



PROTOCOLO USO DE CARETA O ESCUDO FACIAL

CPR-UF-PCEF-0001
REV. 002
FECHA: 03-2021

USO DE CARETA O ESCUDO FACIAL

El escudo facial tiene como objetivo proteger las mucosas que no son cubiertas por la mascarilla, como es el caso de los ojos. El escudo facial no ayuda a retener u obstaculizar las micro gotitas que se expulsan al hablar o estornudar por lo que se debe utilizar en conjunto con la mascarilla que cubra boca y nariz.

AL COLOCARLA:

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón o en su reemplazo alcohol gel antes de manipular el escudo facial.
- Revisar la integridad del escudo facial. Si tiene algún defecto desecharlo o devolver al proveedor ya que no ofrecerá protección.
- Una vez ajustada y colocada, no debe tocar la pantalla frontal con las manos.

AL UTILIZARLA:

- Si necesita tocar el escudo facial para ajustar, debe lavarse las manos previamente con agua y jabón o alcohol gel.
- Para su reutilización, limpiar con un desinfectante apropiado antes de guardar la careta en un lugar seco, preferiblemente en bolsas plástica y protegiéndola de rayadura y daños físicos.

AL RETIRARLA:

- Antes de retirar el escudo facial se deben remover los guantes en caso de utilizar y luego lavar las manos con agua y jabón o alcohol gel.
- Retirar la careta o escudo facial de la parte posterior levantando la banda desde la cabeza.
- Limpiar el escudo facial con un desinfectante apropiado.

REGISTRO DE DIFUSIÓN PROTOCOLO USO ESCUDO FACIAL

NOMBRES	APELLIDOS	FECHA	FIRMA