



PROTOCOLO USO MASCARILLA REUTILIZABLE

CPR-UF-PMR-0001
REV. 001
FECHA: 06-2020

USO DE MASCARILLA REUTILIZABLE

AL COLOCARLA:

- Lavarse las manos con jabón o sanitizar con alcohol antes de manipular la mascarilla.
- Identificar la parte interior y exterior de la mascarilla para colocarla correctamente.
- Sujetar la mascarilla firmemente para cubrir boca y nariz.
- Bajar la parte inferior abriendo los pliegues hasta cubrir la barbilla.
- Una vez ajustada y colocada, no debe tocar con las manos.

AL USARLA:

- Si necesita tocar la mascarilla para ajustar, deben lavarse las manos previamente con jabón o sanitizar con alcohol gel.
- No se debe colocar en la frente o debajo de la barbilla durante su uso.

AL RETIRARLA:

- Retirar la mascarilla desde las amarras o elástico, sin tocar la parte frontal.
- Si se va a continuar utilizándose en un periodo de tiempo corto, se puede colgar, evitando contacto con otros elementos, se aconseja almacenar en bolsa plástica desechable.
- Si ya no se va a utilizar durante el día, colocarla en un recipiente para lavar, separado del resto de la ropa.
- Lavarse las manos con jabón o sanitizar con alcohol gel al quitarse la mascarilla.

AL LAVARLA:

- No clorar, no estrujar.
- Evitar lugares que puedan contaminar la mascarilla.
- Secar a la sombra y no utilizarla húmeda.
- Planchar con un paño encima si es necesario.

INSPECCIÓN VISUAL.

- Tras cada lavado inspeccione la mascarilla, si detecta algún daño, deseche la mascarilla.

REGISTRO DE DIFUSIÓN PROTOCOLO USO MASCARILLA REUTILIZABLE

N°	NOMBRES	APELLIDOS	FECHA	FIRMA